

# EQA-program til kvalitetssikring af Frit Hæmoglobin Program 3253 DK

## Prøvemateriale og sikkerhed

Der medsendes 3 hold á 3 stk. frosne prøver á 1 ml plasma til 2024.

Hver sæt er mærket med årstal og indberetningsnummer og hvert prøveglas er mærket med et nummer.

Prøverne er CPD-plasma evt. tilsat hæmolyserede erythrocytter.

Prøvematerialet er testet og fundet negative for virusmarkører HbsAg, HCV og HIV-1,2.

Sikkerhedsmæssigt skal prøverne behandles som patientprøver.

## Opbevaring og holdbarhed

Ved modtagelsen skal du kontrollere, at alle kontroller er der og at de alle er frosne, hvis ikke kontaktes DEKS. Kontrolprøverne opbevares ved -80 °C indtil analyse.

## Deadlines

Du vil på åbningsdagen for indberetningen modtage en adviseringsmail.

	1. indberetning	2. indberetning	3. indberetning
<b>Prøve nummer</b>	2200306 7181122 6170825	7221025 222211 1302311	9200205 2311070 5170825
<b>Analyseperiode og åben for indberetning</b>	11.03.24 – 19.03.24	17.06.24 – 25.06.24	28.10.24 – 05.11.24

## Instruktion før måling

Kontrolprøverne optøes på vandbad i max. 10 min. ved 37 °C, blandes omhyggeligt og analyseres.

Analyse skal være udført indenfor 2 timer efter optøning.

## Resultatindberetning

Der indberettes elektronisk via [DEKSONline](#).

## Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål rettes til Bioanalytiker Lisbeth Nielsen ✉ [lisbeth.nielsen@deks.dk](mailto:lisbeth.nielsen@deks.dk)

Med venlig hilsen  
Lisbeth Nielsen, DEKS