

# EQA-program til kvalitetssikring af Homocystein

## Program 3034 DK

Hermed sendes prøver til homocystein programmet til alle udsendelser i 2024

### Prøvemateriale og sikkerhed

Prøvematerialet til Homocystein er EDTA plasmapools fra donorer. Prøvematerialet kan være beriget med L-Homocystine stamopløsning.

Prøverne skal håndteres med samme forholdsregler som patientprøver. Prøvematerialerne er testet negative for HIV og hepatitis.

### Opbevaring og holdbarhed

Ved modtagelse anbringes alle prøver i fryser (-20 °C eller derunder). Erfaringer har vist, at forsendelse af prøverne kan ske ved stuetemperatur.

### Deadlines

	1. indberetning		2. indberetning		3. indberetning		4. indberetning	
Prøve-nummer	01_2024	02_2024	03_2024	04_2024	05_2024	06_2024	07_2024	08_2024
Indberetnings - periode	04.03 – 18.03		03.06 - 17.06		26.08 - 09.09		04.11 - 18.11	

Der vil blive sendt en e-mail som påmindelse til laboratoriets kontaktperson, når indberetningsperioden begynder.

### Instruktion før måling

Udtag de to prøver der skal analyseres og tøm dem op ved stuetemperatur. De vendes forsigtigt mindst 10 gange i hånden eller på vendeapparat inden de analyseres.

Eksterne kvalitetskontroller bør behandles som rutineprøver. For at få bedre viden om analysens korrekthed, kan man vælge at analysere gentagne gange for at minimere tilfældige fejl. Der indrapporteres enten gennemsnittet af bestemmelse eller blot første-bestemmelse. I det sidste tilfælde bruges de øvrige gentagne bestemmelser internt til vurdering af troværdigheden/usikkerheden på den indrapporterede første-bestemmelse.

### Resultatindberetning

Der indberettes elektronisk via DEKSONline, [www.deksonline.dk](http://www.deksonline.dk).

### Rapport

Rapporten vil være tilgængelig på [www.deksonline.dk](http://www.deksonline.dk) senest 10 hverdage efter deadline for indberetning.

### Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål vedrørende materialer samt analyse rettes til bioanalytiker Sanne Schou, Telefon: 38 63 44 05, e-mail: [sanne.schou@deks.dk](mailto:sanne.schou@deks.dk).

Med venlig hilsen  
Sanne Schou  
DEKS