

Indberetning af resultater på eksterne kvalitetskontroller fra ECAT

Hvis du har nogle spørgsmål, kontakt da venligst:

- ECAT: info@ecat.nl eller
- DEKS: karin.heidemann@deks.dk / gitte.henriksen@deks.dk

VIGTIGT INFORMATION:

- Når du indtaster resultater, skal du anvende punktum i stedet for , fx 2.3 i stedet for 2,3
- Du kan ikke indtaste tekst i resultatfelterne
- Hvis du ikke har et resultat, så lad feltet være tomt

<p>1. ECAT-website</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åben ECATs hjemmeside: www.ecat.nl • Klik på [POCT] øverst til højre • Klik på [Click here] 																
<p>2. Log på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indtast din laboratoriekode – uden ”POCT” til sidst (leveret af ECAT) • Indtast din adgangskode (leveret af ECAT) • Klik på [Login] <p>Hav siden med resultater klar</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Resultater:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Propfarve</th> <th>INR-Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Grøn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gul</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rød</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Brun</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>QC-kit lot nummer :</p> <p>CoaguChek serienummer :</p> <p>Teststrimmel kodenummer :</p> </div>	Nr.	Propfarve	INR-Resultat	1	Grøn		2	Gul		3	Rød		4	Brun		
Nr.	Propfarve	INR-Resultat														
1	Grøn															
2	Gul															
3	Rød															
4	Brun															
<p>3. Resultatindtastning</p> <p>Siden, hvor resultaterne skal indtastes, åbner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg QC-kit lot nummeret • Klik på [Add Results]. 																

Indberetning af resultater på eksterne kvalitetskontroller fra ECAT

	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg instrumenttype fra dropdown-listen • Indtast CoaguChek serienummeret • Indtast teststrimmel kodenummeret • Indtast analysedato • Indtast INR-resultaterne for kvalitetskontrollerne – husk: Anvend punktum i stedet for komma, fx 3.2 i stedet for 3,2 • Tryk [Save] for at gemme resultaterne. Du har mulighed for at ændre i resultaterne • Tryk [Submit] for at indsende indtastninger. Du kan ikke ændre i resultaterne 																																				
<p>4.</p>	<p>Evaluering</p> <p>Når du har trykket [Submit], åbnes rapporten automatisk.</p> <p>Du kan gennemse, udskrive eller gemme rapporten.</p> <p>Når du bemærker en fejl i rapporten på indsendelsesdagen, er det muligt at indsende resultater for det samme instrument igen. I dette tilfælde vil tidligere indsendte resultater blive overskrevet.</p> <p>Hvis du vil indberette resultat fra flere instrumenter, klikkes på [Add Results] og gentage punkt 3 og 4.</p>	<table border="1"> <caption>Test Results</caption> <thead> <tr> <th>Sample</th> <th>Target</th> <th>UP%</th> <th>Target Range</th> <th>Measured</th> <th>%D</th> <th>Conclusion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.7</td> <td>0.9</td> <td>1.4-2.0</td> <td>1.5</td> <td>-11.8</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.4</td> <td>0.6</td> <td>2.0-2.8</td> <td>2.5</td> <td>4.2</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.5</td> <td>0.7</td> <td>2.8-5.8</td> <td>3.5</td> <td>0.0</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.9</td> <td>0.7</td> <td>3.3-4.5</td> <td>4.0</td> <td>2.6</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Final Conclusion</p> <p>This Coaguchek Monitor passes the ECAT criteria for quality control <input type="checkbox"/> YES</p> <p>Remarks: <input type="text"/></p> <p>Authorizations: 10 Jan. 2024, Dr. P. Meijer Director ECAT Foundation</p>	Sample	Target	UP%	Target Range	Measured	%D	Conclusion	1	1.7	0.9	1.4-2.0	1.5	-11.8	OK	2	2.4	0.6	2.0-2.8	2.5	4.2	OK	3	3.5	0.7	2.8-5.8	3.5	0.0	OK	4	3.9	0.7	3.3-4.5	4.0	2.6	OK
Sample	Target	UP%	Target Range	Measured	%D	Conclusion																															
1	1.7	0.9	1.4-2.0	1.5	-11.8	OK																															
2	2.4	0.6	2.0-2.8	2.5	4.2	OK																															
3	3.5	0.7	2.8-5.8	3.5	0.0	OK																															
4	3.9	0.7	3.3-4.5	4.0	2.6	OK																															
<p>5.</p>	<p>Rapporter gemmes online, så du kan se tidligere rapporter.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Monitor Identification</th> <th>Date</th> <th>% Dev</th> <th>Approval</th> <th>Report</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CoaguChek 03.04</td> <td>8232000.01</td> <td>2024</td> <td>0.0</td> <td>10 Jan 24</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>	Date	Monitor Identification	Date	% Dev	Approval	Report	CoaguChek 03.04	8232000.01	2024	0.0	10 Jan 24	OK																							
Date	Monitor Identification	Date	% Dev	Approval	Report																																
CoaguChek 03.04	8232000.01	2024	0.0	10 Jan 24	OK																																